

Bisco

CE0459

CORE-FLO™ DC Lite *Dual-Cured*

Low Viscosity Core Build-Up

Instructions for Use

ES

IN-218R3
Rev. 1/17



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

CORE-FLO™* DC Lite

Material de reconstrucción de Muñón de Baja Viscosidad

INFORMACIÓN GENERAL

CORE-FLO DC Lite es un composite de curado dual, radiopaco, fluido y que contiene flúor, diseñado específicamente para cementar postes y reconstruir el muñón con una fácil aplicación. **CORE-FLO DC Lite** también es un material ideal de reposición de dentina. **CORE-FLO DC Lite** se presenta en una doble jeringa automezcla, y está disponible tanto en tono Natural/A1 como Blanco Opaco. **CORE-FLO DC Lite** está diseñado para ser usado como agente adhesivo y es compatible con cualquier material de curado dual, como los adhesivos BISCO.

Indicaciones para su uso:

Las principales indicaciones de uso de **CORE-FLO DC Lite** son:

1. Material de reconstrucción de muñones
2. Cementación de postes o pines
3. Material de reposición de la dentina

Advertencias:

- Durante estos procedimientos se debe evitar la contaminación por saliva, sangre o agua. Cuando utilice adhesivos odontológicos, la contaminación comprometerá la adhesión a la dentina y puede provocar una disminución de la longevidad de la restauración.
- Se recomienda utilizar un dique de goma para todas las indicaciones en las que sea posible que se produzca contaminación.

Avisos:

- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los accesorios usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:

- Evite el contacto con la piel; (met)acrilatos y resinas no polimerizadas pueden causar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto, lave la zona con agua y jabón.
- Para evitar la polimerización o la obstrucción, la punta de mezcla de la doble jeringa debe dejarse puesta hasta la siguiente aplicación. Si se utiliza intraoralmente, limpie la punta de mezcla con un desinfectante antes de almacenarla.
- Adiferencia de los adhesivos Bisco, no todos los sistemas de frasco único de grabado total o auto-grabado se adhieren a materiales de auto-curado o curado dual. Consulte las instrucciones del fabricante.
- Aísle la reconstrucción del muñón para realizar impresiones de fabricar puentes/coronas temporales (puede que solo necesite humedecerlo bien), para prevenir que se adhiera a estos materiales.
- Si está refrigerado, el producto debe alcanzar la temperatura ambiente antes de ser usado.
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- La ficha de seguridad está disponible en www.Bisco.com.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conservar a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F):

Tiempo de trabajo: Mínimo 1 minuto

Tiempo de fraguado: Máximo 7 minutos

El tiempo de manipulación y el tiempo de fraguado pueden variar según las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA DEL MATERIAL:

1. Retire el capuchón de la jeringa o la punta de mezcla de la doble jeringa.
2. Coloque una pequeña cantidad de material en un mezclador para eliminar los vacíos existentes en cada cámara de la doble jeringa.
3. Conecte una punta de mezcla a la doble jeringa alineando la llave con la ranura. A continuación, gire el mecanismo de cierre marrón en el sentido de las agujas del reloj.
4. Al apretar el émbolo se procederá a la mezcla y a la dispensación de **CORE-FLO DC Lite**. (Consulte el apartado «INFORMACIÓN TÉCNICA» para más información sobre los tiempos de trabajo y de fraguado).

1. RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES USANDO CORE-FLO DC Lite

- (1) Aísle el diente con un dique de goma.
- (2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO.
- (3) a. Si usa una banda matriz: coloque una banda matriz alrededor del diente preparado. Coloque a punta intraoral directamente en la preparación y dispense **CORE-FLO DC Lite**. Aplique foto curado durante 40 segundos.

- b. Si está usando un muñón: posicione la punta mezcladora en el muñón y dispense **CORE-FLO DC Lite**. Posicione el muñón con el producto sobre el diente preparado y manténgalo ahí. Aplique fotocurado durante 40 segundos.

(4) Prepare y dele el acabado al muñón de la forma habitual, usando fresas de diamante y carburo.

2. TÉCNICA DE CEMENTACIÓN DE POSTE Y RECONSTRUCCIÓN DE MUÑÓN USANDO CORE-FLO DC Lite

(1) Aísle el diente y prepárelo siguiendo las instrucciones del fabricante del poste.

(2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO. Antes de aplicar el fotocurado, seque el canal usando puntas de papel hasta que estas vuelvan secas del canal y seque el adhesivo con aire cuidadosamente para que se evapore el solvente.

NOTA: El paso de la punta de papel es importante para la eliminación de cualquier adhesivo acumulado, de modo que no se produzcan interferencias con el asentamiento completo del poste.

(3) Recubra la superficie del poste con un adhesivo y aplique el fotocurado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Esto aumentará la humectabilidad del poste.

(4) Usando la punta de mezcla del canal de la raíz inyecte **CORE-FLO DC Lite** en el canal. Comience por el extremo apical del canal y retire la punta lentamente mientras mantiene la punta en el cemento para minimizar los vacíos.

(5) Recubra la punta apical del poste con **CORE-FLO DC Lite**. Fije suavemente el poste en el canal y presione con firmeza durante 20-30 segundos una vez asentado el poste.

(6) Siga aplicando **CORE-FLO DC Lite** alrededor del poste y reconstruya el muñón hasta conseguir la altura y la forma deseadas.

(7) Retire el exceso de material y aplique fotocurado durante 40 segundos acercando la punta de luz al poste y a la reconstrucción tanto como sea posible.

(8) Prepare y dele el acabado al muñón de la forma habitual, usando fresas de diamante y carburo.

3. MATERIAL DE REPOSICIÓN DE LA DENTINA

(1) Aísle el diente y prepare la cavidad de una forma conservadora. Enjuague y seque.

(2) Aplique un adhesivo según las instrucciones del fabricante; recomendamos el uso de cualquiera de los productos adhesivos BISCO.

(3) Aplique **CORE-FLO DC Lite** solo hasta el nivel de la unión de esmalte y dentina.

(4) Aplique fotocurado a **CORE-FLO DC Lite** durante 10 segundos. Continúe compactando firmemente un composite de fotocurado, aumentando la cantidad gradualmente hasta que la preparación de la cavidad se llene. Aplique el fotocurado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(5) Compruebe la oclusión y continúe con los procedimientos de acabado y pulido.

HIGIENE: Para prevenir la polimerización o el taponamiento, la punta de mezclado dual debe ser dejada en la jeringa hasta el próximo uso. El uso de cubiertas protectoras higiénicas para evitar cualquier contaminación de las jeringas durante el tratamiento es recomendado. Si la jeringa es utilizada intraoralmente, limpiar la superficie de la punta de mezcla con desinfectante antes de guardarla.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones nacionales o regionales relacionadas con los residuos.

CONSERVACIÓN: Conserve el kit a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Compruebe las etiquetas de los componentes individuales para ver las fechas de caducidad de cada uno.

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* CORE-FLO es una marca comercial de BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92