

*Bisco*

CE

# ***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

NL

IN-090R7  
Rev. 10/16

# DUAL-SYRINGE DELIVERY SYSTEM


## ALGEMENE INFORMATIE

Het DUAL-SYRINGE meng-/applicatiesysteem zorgt voor een consistent mengsel van basis en katalysator bij gebruik van de zgn. statische mengtip. De DUAL-SYRINGE biedt extra gebruiksgemak doordat het de tandarts mogelijk maakt het materiaal direct in de preparatie/restauratie te brengen met volledige beheersing van de hoeveelheid te appliceren materiaal.

Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor INSTRUCTIES AANGAANDE HET PRODUCT, ZIJN INDICATIES EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder de dop van de DUAL-SYRINGE door deze tegen de klok in los te draaien en hem van de spuit af te trekken.
2. Bij het eerste gebruik van de DUAL-SYRINGE: Dispenseer de eerste 2-3mm materiaal op een mengblokje om zeker te zijn van een homogeen mengsel.
3. Plaats de statische mengtip waarbij de (A) in lijn moet zijn met nok (B) en draai hem met de klok mee op de spuit totdat hij vastzit.

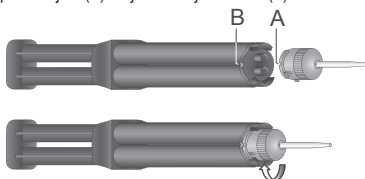

4. OPTIE 1: Spuit materiaal in de preparatie of restauratie met de statische mengtip.

OPTIE 2: Intraorale applicatie met een Unit-Dose Tip: monteer een unit-dose tip op de opening van de statische mengtip en spuit het materiaal in de Unit-Dose Tip. Plaats de plunjer en zet de tip in een unit-dose-spuit.

5. De DUAL-SYRINGE statische mengtip moet tot de volgende applicatie op zijn plaats blijven. Indien intraoraal gebruikt moet hij met een desinfectans worden afgeveegd alvorens hij wordt weggelegd. Dispenseer alvorens een nieuwe tip wordt geplaatst 2-3 millimeter van basis en katalysator op een mengblok.

**HYGIËNE:** Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.

**AFVOER:** Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

**GARANTIE:** BISCO, Inc. aanvaardt haar verantwoordelijk om producten te vervangen indien zij aanwijsbaar fouten vertonen. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of gevolgschade als gevolg van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de beschreven producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen alvorens tot gebruik over te gaan. De gebruiker aanvaardt elk risico een aansprakelijkheid in verband hiermee.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
www.bisco.com



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92