

Bisco

CE

DUAL-SYRINGE

Instructions for Use



IT

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.

847-534-6000
1-800-247-3368

IN-090R7
Rev. 10/16

SISTEMA DI MISCELAZIONE A SIRINGA DOPPIA


INFORMAZIONI GENERALI

Il sistema di miscelazione A SIRINGA DOPPIA permette di ottenere una miscelazione ottimale di Base e Catalizzatore, utilizzando il puntale di miscelazione apposito. È un sistema comodo, che permette al dentista di applicare il materiale direttamente nella preparazione o nel restauro, mantenendo il controllo della quantità di materiale estruso.

Per: INFORMAZIONI GENERALI, INDICAZIONE, ISTRUZIONI D'USO fare riferimento alle istruzioni d'uso dei singoli materiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere il cappuccio dall'applicatore ruotandolo in senso antiorario e tirandolo.
2. La prima volta che si utilizza la siringa far uscire 2-3 mm di materiale su un blocco di miscelazione per assicurare una miscelazione omogenea tra base e catalizzatore.
3. Inserire il puntale di miscelazione allineando le due tacche a V presenti sul puntale e sulla siringa (A e B) e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.

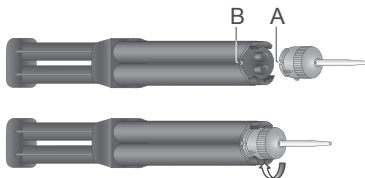

4. **OPZIONE 1:** Applicare il materiale direttamente sul restauro o sulla preparazione usando il puntale di miscelazione.
OPZIONE 2: Per l'uso intraorale con un puntale monodoso: posizionare un puntale monodoso sul foro di uscita del puntale di miscelazione della siringa doppia ed estrarre il materiale al suo interno. Posizionare il pistone e inserire il puntale in una siringa per puntali monodosi.
5. **Il puntale di miscelazione della siringa doppia deve essere lasciato sulla siringa fino al successivo utilizzo. In caso di utilizzo intra-orale, deve essere pulito e disinfettato prima di riporre la siringa. Prima di inserire un nuovo puntale, erogare 2-3 mm di base e catalizzatore su un blocco di miscelazione per verificare l'estrusione uniforme di entrambi i prodotti.**

IGIENE: Si consiglia di utilizzare le comuni regole di igiene per evitare contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.

SMALTIMENTO: Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.

GARANZIA: Bisco Inc. si fa carico della sostituzione di eventuali prodotti difettosi. Bisco Inc. non è responsabile di eventuali danni o perdite, dirette o conseguenti dall'uso scorretto o non conforme dei prodotti descritti. Prima dell'utilizzo, è responsabilità dell'utente determinare l'adeguatezza del prodotto per la finalità d'uso richiesta. L'utente si fa carico di tutti i rischi da ciò derivanti.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92