

Bisco

CE 0459

*Choice*TM **2**

*Light-
Cured*

Veneer Cement

Instructions for Use

DK



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

IN-149R3
Rev. 8/10

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000

CHOICE™ 2

finercement

GENERELLE OPLYSNINGER

CHOICE 2 L/C (Light-Cured (lyshærdet)) er en farvestabil ($\Delta E < 1.2^{\Delta}$), lyshærdet cementeringscement med høj kompressionsstyrke, som er formuleret udelukkende til cementering af porcelæn og indirekte kompositfacader.

CHOICE 2 WATER-SOLUBLE TRY-IN PASTES leveres separat og kan benyttes til at visualisere og bestemme den endelige cementerings æstetik.

CHOICE 2 er beregnet til brug med almindeligadhæsiver som f.eks. ALL-BOND 2™, ALL-BOND 3™, ONE-STEP™ eller ONE-STEP PLUS.

Indikationer for brug:

- Cementering af porcelæns- eller kompositfacader

Advarsel:

- Dentalprodukter kan indeholde kemikalier, der er mærket som værende farlige. Se de enkelte specifikke brugsanvisninger/sikkerhedsdatablade for oplysninger vedrørende risiko- og/eller sikkerhedsfaktorer forbundet med produktet.
- Ved brug af dentale adhæsiver vil spyt kontaminering alvorligt kompromittere binding til dentin. Se den vedlagte brugsanvisning for yderligere oplysninger.

Advarsel:

- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde dele som kun er beregnet til engangsbrug. Kasser brugte eller kontaminede tilbehørsdele, Rens, desinficer eller genbrug ikke.

Forholdsregler:

- Se de specifikke produkters brugsanvisning for fuldstændige oplysninger før brug.
- I modsætning til ONE-STEP og ONE-STEP PLUS er ikke alle enkeltbeholder adhæsiver kompatible med dualhærdende og selvhærdende resiner. Se producentens brugsanvisning for yderligere oplysninger.
- Ikke-polymeriserede resiner kan forårsage hudsensitivitet hos personer med en tendens dertil. Undgå hudkontakt. Hvis der forekommer hudkontakt skal der vaskes med sæbe og vand.
- Se de individuelle komponenters markeringer for specifikke udløbsdatoer.

BRUGSANVISNING

BINDING AF PORCELÆNSFACADER:

AFPRØVNING OG PRÆPARATION AF Facader:

1. Sørg for at porcelænsfineren er ætset på passende vis, eller æts fineren i henhold til producentens anvisninger med hydrogenfluorid (f.eks. 9,5 % PORCELAIN ETCHANT*).
2. Pensl 1 - 2 lag silan (ved brug af BIS-SILANE™ 2-Part Porcelain Primer blandes del A og B i forholdet 1:1) på indersiden af facaderne. Vent 30 sekunder og lufttør.

BEMÆRK: Fladen af den primede porcelæn vil se ens ud før og efter silanisering.

3. Rengør tandområdet med en slurry af pimpsten, skyl og tør.
4. Afprøv de silan-dækkede facader på tanden for at sikre, at de passer rigtigt. Den ønskede farve af Try-In Paste påføres finerne, og de sættes forsigtigt på tænderne.

BEMÆRK: Try-In Paste vil ikke størkne og vil matche den tilsvarende cementeringscement.

5. Når den ønskede farve er bestemt, fjernes facaderne, og både tanden og facaden skylles med vand. Facaden bør skylles omhyggeligt med vand, eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand eller ethanol/propylalkohol i 2 - 3 minutter og derefter tørres.

PRÆPARATION AF TANDEN:

1. Rengør de præparerede tænder med en slurry af pimpsten. Skyl og tør.
2. Isolér de præparerede tænder (ideelt to af gangen) med mellemægsmateriale eller mylarbånd.
3. Æts emalje og dentin med UNI-ETCH* (32 % fosforsyre) m/BAC* i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt og fjern overskydende vand, men undlad at udtørre; det præparerede område skal være synligt fugtig.
4. Påføring af bindingsmateriale:

BRUGERE AF ALL-BOND 3: Bland del A og B i forholdet 1:1 og påfør 1 - 2 lag efter hinanden på det præparerede område. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud. Lyshærd i 10 sekunder ved 500mW/cm².

BRUGERE AF ALL-BOND 2: Bland PRIMER A og B (1:1) og påfør 2 - 3 lag efter hinanden på det præparerede område. (Yderligere lag kan være nødvendige, hvis der er meget blottet dentin.) Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud. Lyshærd i 3 - 5 sekunder ved 500mW/cm². Påfør et meget tyndt lag D/E RESIN* over de primede tænder og lufttør. D/E RESIN må IKKE lyshærdes.

BRUGERE AF ONE-STEP: Påfør 1 - 2 lag efter hinanden af ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på det præparerede område. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Lyshærd i 10 sekunder ved 500mW/cm².

5. Fjern mellemægsmaterialet eller mylarbåndene.

CEMENTERING:

1. Påfør den indvendige flade af facaden et meget tyndt lag HEMA-fri resin, f.eks. PORCELAIN BONDING RESIN*, og UNDLAD AT LYSHÆRDE.
2. Påfør facaden indvendige flade en rigelig mængde af den valgte farve af **CHOICE 2** finercement.
3. I det der arbejdes parvis, placeres forsigtigt en facade af gangen, og begge facader føres på plads med passivt tryk.
4. Lyshærd hver af dem i 3 - 5 sekunder ved 500mW/cm², så facaderne klæbes på plads.
5. Fjern overskydende cement.
6. Lyshærd hver finer i 40 sekunder ved 500mW/cm² lingualt og 40 sekunder ved 500mW/cm² facialt.

BINDING AF KOMPOSITfacader:

AFPRØVNING og PRÆPARATION AF FACADER:

1. Rengør tandpræparationen med en slurry af pimpsten, skyl og tør.
2. Afprøv kompositfacaderne på tænderne for at sikre, at de passer rigtigt. Påfør facaderne den ønskede farve af Try-In Paste, og sæt dem forsigtigt på tænderne. (Try-In Paste vil ikke styrke og vil matche den tilsvarende cementeringscement.) Når den ønskede farve er bestemt, fjernes facaderne, og tanden skylles med vand. Facaderne bør skylles omhyggeligt med vand (eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand i 2 - 3 minutter) og derefter tørres.
3. Sandblæs facadens indvendige flade let i 1 - 2 sekunder. Skyl og tør.

PRÆPARATION AF TANDEN:

1. Rengør de præparerede tænder med en slurry af pimpsten. Skyl og tør.
2. Isolér de præparerede tænder (ideelt to af gangen) med mellemægsmateriale eller mylarbånd.
3. Ætts emalje og dentin med UNI-ETCH (32 % fosforsyre) m/BAC i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt og fjern overskydende vand, men **undlad at tørre**; det præparerede område skal være synligt fugtigt.
4. Påføring af bindingsmateriale:
BRUGERE AF ALL-BOND 3: Bland del A og B i forholdet 1:1 og påfør 1 - 2 lag efter hinanden på det præparerede område. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud. Lyskøber i 10 sekunder ved 500mW/cm².
BRUGERE AF ALL-BOND 2: Bland PRIMER A og B (1:1) og påfør 2 - 3 lag efter hinanden på det præparerede område. (Yderligere lag kan være nødvendige, hvis der er meget blottet dentin.) Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud. Lyskøber i 3 - 5 sekunder ved 500mW/cm². Påfør et meget tyndt lag D/E RESIN over de primede tænder og lufttør. D/E RESIN må IKKE lyskøberes.
BRUGERE AF ONE-STEP: Påfør område 1 - 2 lag efter hinanden af ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på det præparerede område. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt, så opløsningsmidlet fordamper. Lyskøber i 10 sekunder ved 500mW/cm².
5. Fjern mellemægsmaterialet eller mylarbåndene.

CEMENTERING:

1. Prime facadens indvendige flade med ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 eller ONE-STEP:
BRUGERE AF ALL-BOND 3: Bland del A og B i forholdet 1:1 og påfør den indvendige flade af facaden den indvendige flade af facaden 1 - 2 lag efter hinanden. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt med en mild luftstrøm og UNDLAD at lyskøber.
BRUGERE AF ALL-BOND 2: Bland PRIMER A og B (1:1) og påfør den indvendige flade af facaden 2 - 3 lag efter hinanden. Fjern overskydende primer med en mild luftstrøm. Påfør et meget tyndt lag HEMA-fri resin, f.eks. PORCELAIN BONDING RESIN, over den primede facade og lufttør. PORCELAIN BONDING RESIN må IKKE lyskøberes.
BRUGERE AF ONE-STEP: Påfør 1 - 2 lag efter hinanden af ONE-STEP eller ONE-STEP PLUS på den indvendige flade af facaden. Lufttør forsigtigt, men omhyggeligt med en mild luftstrøm og UNDLAD at lyskøber.
2. Påfør facadens indvendige flade en rigelig mængde af den valgte farve af **CHOICE 2** finercement.
3. I det der arbejdes parvis, anbringes forsigtigt en facade af gangen, og begge facader føres på plads med passivt tryk.
4. Lyskøber hver af dem i 3 - 5 sekunder ved 500mW/cm², så facaderne klæbes på plads.
5. Fjern overskydende cement.
6. Lyskøber hver finer i 40 sekunder ved 500mW/cm² lingualt og 40 sekunder ved 500mW/cm² facialt.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

WARRANTY: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* CHOICE og BIS-SILANE er varemærker tilhørende BISCO, Inc.
ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP og UNI-ETCH er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.
PORCELAIN ETCHANT, D/E RESIN og PORCELAIN BONDING RESIN er produceret af BISCO, Inc.

▲ ΔE < 2 kan ikke opfattes med det menneskelige øje.

■ BAC står for benzalkoniumchlorid, et antimikrobielt middel.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

EC Representative
BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92