

Bisco

CE 0459

ChoiceTM 2

Light-Cured

Veneer Cement

Instructions for Use

FI



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry[®]

IN-149R3
Rev. 8/10

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000

CHOICE™* 2
Laminaattisementti
YLEISIÄ TIETOJA

CHOICE 2 L/C (Valokoveteinen) väristabiili ($\Delta E < 1,2^*$), korkea puristuslujuus, valokoveteinen resinisementti, joka on suunniteltu yksinomaan posliini ja muovilaminaattien sementointiin.

CHOICE 2 VESILIIKUISET TRY-IN pastat on saatavilla erikseen, ja niitä voidaan käyttää lopullisen sementoinnin estetiikan visualisointiin ja ennaltamääräämiseen.

CHOICE 2 on tarkoitettu käytettäväksi universaalien sidosaineiden kuten ALL-BOND 2™, ALL-BOND 3™, ONE-STEP™ tai ONE-STEP PLUS kanssa.

Käyttöalueet:

- Posliini ja muovilaminaattien sementointi

Varoitukset:

- Hammashoidon tuotteet voivat sisältää vaaralliseksi merkittyjä kemikaaleja. Tarkista Käyttöohjeesta/MSDS käyttöturvallisuustiedotteesta tiedot, jotka koskevat riskejä ja/tai tuotteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
- Kiinnityssementejä käytettäessä syljen kontaminaatio heikentää merkittävästi dentiinisidosta. Katso lisätietoja liitteessä olevista käyttöohjeista.

Varoitukset:

- Ristikontaminaatio: Tuote voi sisältää kertakäyttöiseksi tarkoitettuja osia. Tuhoa käytetyt tai kontaminoituneet tuotteet. Älä puhdista, desinfioi tai uudelleenkäytä.

Varoitoimenpiteet:

- Tarkista tuotteen käyttöohjeesta täydelliset tiedot ennen käyttöä.
- Toisin kuin ONE-STEP ja ONE-STEP PLUS, kaikki yhden pullon sidosaineet eivät ole yhteensopivia kaksoiskoveteisten kanssa. Katso valmistajan käyttöohjeiden lisätietoja.
- Polymeroimattomat resiniit voivat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Vältä ihokosketusta. Ihokontaktin sattuessa pese iho saippualla ja vedellä.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä tuotteen omasta etiketistä.

KÄYTTÖOHJEET

POSLIINILAMINAATTIEN KIINNITYS:

TRY-IN ja LAMINAATTIN VALMISTELU:

1. Varmista, että posliinilaminaatti on etsattu asianmukaisesti tai etsaa se valmistajan ohjeiden mukaan fluorivetyhapolla (kuten 9,5 % PORCELAIN ETCHANT™).
2. Harjaa 1-2 kerrosta silaania (Käytettäessä BIS-SILANE™* 2-osaista posliiniprimeria, sekoita osat A ja B suhteessa 1:1) laminaatin sisälle. Odota 30 sekuntia ja kuivaa.

HUOMIO: primeroidun laminaatin pinta näyttää samanlaiselta ennen silaointia ja sen jälkeen.

3. Puhdista preparoiu hammas hohkakivellä, huuhtelee ja kuivaa.
4. Kokeile silaaniilla päällystettyjä laminaatteja hampaaseen, jotta ne istuvat hyvin. Levitä haluttu sävy Try-In Pastaa laminaatin pinnoille ja aseta varovasti hampaaseen.

HUOMIO: Try-In Pasta ei kovetu ja soveltuu yhteen vastaavan resinisementin kanssa.

5. Kun haluttu sävy on määritetty, poista laminaatit ja huuhtelee sekä hammas että laminaatti vedellä. Laminaatti on huuhdeltava huolellisesti vedellä tai mieluiten ultraäänessä, tislattulla vedellä tai etanolilla/isopropyylialkoholilla 2-3 minuuttia ja sen jälkeen se on kuivattava.

HAMPAAN PREPAROINTI:

1. Puhdista preparoiu hammas hohkakivellä. Huuhtelee ja kuivaa.
2. Eristä preparoiu hammas (mieluiten kaksi kerrallaan) metallifolioilla tai mylar-stripsillä.
3. Etsaa kille ja dentiini UNI-ETCH™ (32 % fosforihappo) w/BAC* 15 sekunnin ajan. Huuhtelee huolellisesti ja poista ylimääräinen vesi, **mutta älä kuivaa**; hampaan pitäisi olla näkyvästi kostea.
4. Levitä sidosaine:

ALL-BOND 3 KÄYTTÄJÄT: Sekoita Osat A ja B suhteessa 1:1 ja levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta hampaaseen. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä. Valokoveta 10 sekunnin ajan 500mW/cm².

ALL-BOND 2 KÄYTTÄJÄT: Sekoita PRIMERIT A ja B (1:1) ja levitä 2-3 peräkkäistä kerrosta hampaaseen. (Lisäkerrokset saattavat olla tarpeellisia, jos dentiiniä on näkyvillä paljon.) Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä. Valokoveta 3-5 sekunnin ajan 500mW/cm². Levitä hyvin ohut kerros D/E RESIN™iä hampaaseen ja kuivaa. ÄLÄ valokoveta D/E RESIN iä.

ONE-STEP KÄYTTÄJÄT: Levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta ONE-STEP tai ONE-STEP PLUS hampaaseen. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Valokoveta 10 sekunnin ajan 500mW/cm².

5. Poista metallifolio tai mylar- stripsit.

SEMENTOINTI:

1. Levitä hyvin ohut kerros hematonta resiniä, kuten PORCELAIN BONDING RESIN* laminaatin sisäpinnalle, ÄLÄ VALOKOVETA.
2. Levitä runsas määrä valittua sävyä **CHOICE 2** sementtiä laminaatin sisäpinnalle.
3. Työskentelemällä pareittain aseta varovasti yksi laminaatti kerrallaan ja ohjaa varovasti molemmat laminaatit paikoilleen passiivisella paineella.
4. Valokoveta molempia 3-5 sekunnin ajan 500mW/cm² ja aseta laminaatit paikoilleen.
5. Poista ylimääräinen sementti.
6. Valokoveta jokainen laminaatti 40 sekunnin ajan 500mW/cm² linguaalisesti ja 40 sekuntia 500mW/cm² faciaalisesti.

YHDISTELMÄMUOVILAMINAATIN KIINNITYS:

TRY-IN ja LAMINAATIN VALMISTUS:

1. Puhdista preparoitut hampaat hohkakivellä, huuhtelee ja kuivaa.
2. Kokeile muovilaminaatteja hampaisiin, jotta ne istuvat hyvin. Levitä haluttu sävy Try-In pastaa laminaateille ja aseta varovasti hampaisiin. (Try-In pasta ei kovetu ja soveltuu yhteen vastaavan resiniinimentin kanssa.) Kun haluttu sävy on määrätty, poista laminaatit ja huuhtelee hampas vedellä. Laminaatti on huuhdeltava huolellisesti vedellä (tai mieluiten ultraäänessä tislattulla vedellä 2-3 minuuttia) ja kuivata.
3. Hiekkapuhalla kevyesti laminaatin sisäpinta 1-2 sekunnin ajan. Huuhtelee ja kuivaa.

HAMPAAN PREPAROINTI:

1. Puhdista preparoidut hampaat hohkakivellä. Huuhtelee ja kuivaa.
2. Eristä preparoidut hampaat (mieluiten kaksi kerrallaan) metallifolioilla tai mylar-stripseillä.
3. Etsaa kille ja dentiini UNI-ETCH (32 % fosforihappo) w/BAC 15 sekunnin ajan. Huuhtelee huolellisesti ja poista ylimääräinen vesi, älä kuivaa; preparoinnin pitäisi olla näkyvästi kostea.
4. Levitä sidosaine:

ALL-BOND 3 KÄYTTÄJÄT: Sekoita Osat A ja B suhteessa 1:1 ja levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta laminaattiin. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä. Valokoveta 10 sekunnin ajan 500mW/cm².

ALL-BOND 2 KÄYTTÄJÄT: Sekoita PRIMERIT A ja B (1:1) ja levitä 2-3 peräkkäistä kerrosta laminaattiin. (Lisäkerrokset saattavat olla tarpeellisia, jos dentiiniä on näkyvillä paljon.) Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Pinnan tulee olla kiiltävä. Valokoveta 3-5 sekunnin ajan 500mW/cm². Levitä hyvin ohut kerros D/E RESINIä käsiteltyyn hampaaseen ja ilmaa kuivaa. ÄLÄ valokoveta D/E RESIN resiniä.

ONE-STEP KÄYTTÄJÄT: Levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta ONE-STEP tai ONE-STEP PLUS laminaattiin. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti, jotta liuotin haihtuu. Valokoveta 10 sekunnin ajan 500mW/cm².

5. Poista metallifolio tai mylar- stripsit.

SEMENTOINTI:

1. Käsittele koko laminaatin pinta ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 tai ONE-STEP tuotteella:

ALL-BOND 3 KÄYTTÄJÄT: Sekoita Osat A ja B suhteessa 1:1 ja levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta laminaatin koko pintaan. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti ilmavirralla ja ÄLÄ valokoveta.

ALL-BOND 2 KÄYTTÄJÄT: Sekoita PRIMERIT A ja B (1:1) ja levitä 2-3 peräkkäistä kerrosta laminaatin koko pintaan. Poista ylimääräinen kevyesti ilmapuustilla. Levitä hyvin ohut kerros hematonta resiniä kuten PORCELAIN BONDING RESIN käsiteltyyn laminaattiin ja ilmaa kuivaa. ÄLÄ valokoveta PORCELAIN BONDING RESINIä.

ONE-STEP KÄYTTÄJÄT: Levitä 1-2 peräkkäistä kerrosta ONE-STEP tai ONE-STEP PLUS laminaatin koko pintaan. Kuivaa varovasti mutta perusteellisesti kevyesti ilmapuustilla ja ÄLÄ valokoveta.

2. Levitä runsas määrä valittua sävyä **CHOICE 2** resiniinimenttiä laminaatin sisäpinnalle.
3. Työskentelemällä pareittain, aseta varovasti yksi laminaatti kerrallaan ja ohjaa varovasti molemmat laminaatit paikoilleen passiivisella paineella.
4. Valokoveta molempia 3-5 sekunnin ajan 500mW/cm² ja aseta laminaatit paikoilleen.
5. Poista ylimääräinen sementti.
6. Valokoveta jokainen laminaatti 40 sekunnin ajan 500mW/cm² linguaalisesti ja 40 sekuntia 500mW/cm² faciaalisesti.

SÄILYTYS: Varastoi huonelämpötilassa (20°C/68°F - 25°C/77°F).

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksestä, joko suoraan tai välillisesti, jotka johtuvat käyttäjän tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää kuvattuja tuotteita. Ennen käyttöä käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Siinä tapauksessa käyttäjä kantaa kaikki riskit ja vastuut.

* CHOICE ja BIS-SILANE ovat BISCO, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP ja UNI-ETCH ovat BISCO, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PORCELAIN ETCHANT, D/E RESIN, ja PORCELAIN BONDING RESIN ovat BISCO, Inc:n valmistamia tuotteita.

▲ ΔE < 2 ei ole havaittavissa ihmisen silmällä.

■ BAC on bentsalkoniumkloridi, mikrobinvastainen aine.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

EC Representative
BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92