

Bisco

CE0459

ALL-BOND 2[®]

Dual-Cured

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

ES



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

IN-0005R6
Rev. 10/09

ALL-BOND 2[™], es un avance único en el campo dental que puede satisfacer todas sus necesidades de Adhesión. **ALL-BOND 2** es el único Sistema Adhesivo de polimerización dual necesario para la unión a dentina, esmalte, metales (preciosos y no preciosos), composite, amalgama y porcelana. Los Primers hidrofílicos de **ALL-BOND 2** se unen micromecánicamente a la dentina con valores de adhesión incluso superiores a los 30 MPa.

INSTRUCCIONES

Para instrucciones más detalladas ver **LA GUÍA TÉCNICA** de **ALL-BOND 2**.

Aplicar **ALL-ETCH[™]** (10% H₃PO₄) sobre el esmalte y la dentina durante 15 seg. o **UNI-ETCH[™]** (32% H₃PO₄) durante 15 seg. Lavar con abundante agua, utilizar la jeringa de aire durante 1 ó 2 sec. para eliminar el exceso de agua. **NO SECAR. ALL-BOND 2** requiere cierta humedad sin contaminación de saliva.

Dispensar y mezclar partes iguales de Primers A y B en los pocillos, cerrar **INMEDIATAMENTE** los frasquitos. Aplicar 5 capas consecutivas de los Primers sobre la preparación, incluido el esmalte. **NO SECAR ENTRE CAPAS**. Después de aplicar los Primers, secar con aire de 5 a 6 seg. para garantizar la total evaporación de los solventes y la correcta eliminación del agua. La superficie debe presentar una apariencia brillante, si no es así repetir la aplicación de la mezcla de Primers.

¡IMPORTANTE! Para un mejor control y evitar pérdidas en los Primers:

1. Tomar los frasquitos verticalmente y presionar suavemente.
2. Mientras se presiona, invertir el frasquito hasta obtener las gotas necesarias (1 ó 2 serán suficientes).
3. Volver el frasquito a su posición inicial dejando de presionar, de esta forma el Primer dejará de gotear. Cerrar los Primers inmediatamente.

Para restauraciones directas con composite, aplicar una capa fina de **D/E RESIN[™]** (**DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN**) sobre la superficie tratada con los Primers, fotopolimerizar durante 20 seg con una intensidad de 500mW/cm². Mezclando partes iguales de **PRE-BOND[™]** Resin y **DENTIN/ENAMEL BONDING RESIN** puede utilizarse como adhesivo dual de forma que podrá fotopolimerizar o autopolimerizar. También puede utilizarse **PRE-BOND** para contrarrestar el efecto acelerador de los Primer sobre los composites auto o fotopolimerizables. Aplicar y acabar el composite seleccionado. Para disminuir considerablemente el desgaste de los composites, sellar los márgenes y la superficie con **BISCO FORTIFY[™]** Sellador de Superficie de Composite inmediatamente después del acabado de la restauración.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). Referirse a las etiquetas de los componentes individuales para fechas de expiración individuales. Los primers se evaporan fácilmente, mantener las botellas bien cerradas.

PRECAUCIONES: **UNI-ETCH** y **ALL-ETCH** contienen ácido fosfórico. Evitar salpicaduras en los ojos. Si los acondicionadores entran en contacto con los ojos, lavar con grandes cantidades de agua y visitar al médico. Las resinas no polimerizadas pueden causar irritación en pieles sensibles. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón.

GARANTÍA: **BISCO, Inc.** se responsabiliza de reemplazar los productos que se demuestre estén defectuosos. **BISCO, Inc.** no se responsabiliza de daños o pérdidas, ya sean directos o derivados del uso incorrecto o de la falta de capacidad para usar dichos productos. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario determinar la conveniencia de usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que su uso pueda ocasionar.

PRECAUCIONES: Según las leyes de los EE.UU., la venta de este producto está restringida a los profesionales de odontología.

* **ALL-BOND 2**, **ALL-ETCH**, y **UNI-ETCH** son marcas registradas de **BISCO, Inc.**
D/E RESIN es fabricado por **BISCO, Inc.**
PRE-BOND y **FORTIFY** son marcas de **BISCO, Inc.**

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

EC Representative
BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92