

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

NL



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

**ACE[®]* AUTOMAAT
GEBRUIKSAANWIJZING**



HET NIEUWE PATROON LADEN EN ACTIVEREN

NB: Zorg ervoor dat de twee rode zuigers van de ACE-automaat volledig teruggetrokken zijn door op de ejectknop (uitwerpknop) te drukken. (De zuigers mogen niet zichtbaar zijn voordat het patroon wordt geladen.)

1. Steek het patroon in de ACE-automaat **met het label naar boven**.
2. Verwijder de dop.
3. Druk herhaaldelijk op de oranje knop totdat er druppels uit beide uiteinden van het patroon komen.

HET PRODUCT DOSEREN VOOR GEBRUIK

1. Plaats beide patroonuiteinden boven een mengbakje en druk één keer op de oranje knop. De juiste hoeveelheid materiaal zal gedoseerd worden. Indien noodzakelijk tikt u de uiteinden tegen de zijkant van het mengbakje om de druppels te verwijderen.
2. Plaats de dop stevig terug op het patroon. **Het wordt aanbevolen het patroon in de ACE-automaat te laten totdat het leeg is.**



HET PATROON UITWERPEN

1. Om het patroon te verwijderen, draait u de ACE-automaat zodanig dat het logo omlaag wijst. **Met de dop verwijderd**, schuift u de ejectknop.
2. Trek het patroon uit de ACE-automaat.
3. Gooi de dop en het patroon weg.
4. Laad een nieuw patroon.

ONTSMETTING: Gebruik een desinfecterend sproeimiddel of desinfecterende doekjes voor het oppervlak die worden aanbevolen voor ABS-, PVC- en polycarbonaat- (PC) plastic, volgens de instructies van de fabrikant. Vermijd rechtstreeks contact van de ontsmettingsoplossing met het adhesiemateriaal op de patroonuiteinden. Niet onderdompelen of in een autoclaaf steriliseren.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92