

**Bisco**

CE

**ACE**<sup>®</sup>  **Dispenser**  
one and done

## Instructions For Use

**DE**



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry™


U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN ACE<sup>®</sup> DISPENSER

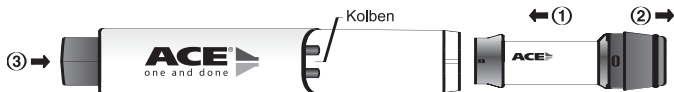

### LADEN UND AKTIVIEREN DER NEUEN KARTUSCHE

**HINWEIS:** Sicherstellen, dass die zwei roten Kolben des ACE-DISPENSERS vollständig zurückgezogen sind. Dazu die Auswurf-taste drücken. (Die Kolben dürfen vor dem Laden der Kartusche nicht zu sehen sein.)

1. Bei nach oben gerichtetem Etikett die Kartusche in den ACE-Dosierer stecken.
2. Die Kappe abnehmen.
3. Den orangefarbenen Knopf wiederholt drücken, bis aus beiden Spitzen der Kartusche Tropfen austreten.

### ABGEBEN DES PRODUKTES

1. Beide Kartuschenspitzen über der Mischschale positionieren und den orangefarbenen Knopf 1 x drücken. Daraufhin wird das Material im richtigen Mengenverhältnis abgegeben. Falls notwendig, mit den Spitzen die Seite der Mischschale berühren, um die Tropfen freizusetzen.
2. Die Kartusche wieder fest mit der Kappe verschließen. Die Kartusche sollte im ACE-Dosierer verbleiben, bis sie leer ist.



### AUSWERFEN DER KARTUSCHE

1. Zum Entfernen der Kartusche den ACE-Dosierer drehen, bis das Logo nach unten zeigt. Bei entfernter Kappe die Auswurf-taste vorschieben.
2. Die Kartusche aus dem ACE-Dosierer herausziehen.
3. Kappe und Kartusche entsorgen.
4. Eine neue Kartusche laden.

**DESINFEKTION:** Nach Herstelleranleitung mit Flächendesinfektionsspray oder -tüchern, die für ABS- PVC- und PC-Kunststoffe zugelassen sind, desinfizieren. Den direkten Kontakt des an den Kartuschenspitzen befindlichen Adhesive Materials mit der Desinfektionslösung vermeiden. Nicht in die Desinfektionslösung eintauchen oder autoklavieren.

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. Nicht unter diese Gewährleistung fallen Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und die Haftung.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92