

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

NO



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™


BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

**ACE[®]* DISPENSER
BRUKSANVISNING**

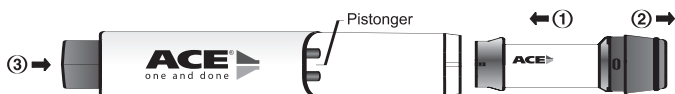

► **LADDA OCH AKTIVERA EN NY PATRON**

VIKTIGT: Kontrollera att de två röda pistongerna i ACE dispensern är fullt tillbakadragna genom att trycka ejektorknappen i sidled. (Pistongerna skall inte vara synliga vid insättningen av en patron.)

1. **Med etiketten riktad uppåt**, sätt in en patron i ACE Dispensern.
2. Ta bort skyddshatten.
3. Tryck på den brandgula knappen upprepade gånger tills droppar kommer ut ur båda öppningarna på patronen.

► **DISPENSERING VID ANVÄNDNING**

1. Håll båda öppningarna på patronen över en blandningskopp och tryck på den brandgula knappen 1 gång. Material i korrekta proportioner kommer att pressa fram. Om så behövs stryk av dropparna i öppningarna mot blandningskoppens kant.
2. Återplacera skyddshatten väl på patronen. **Det rekommenderas att patronen lämnas kvar i ACE dispensern tills den är förbrukad.**



► **FRIGÖRA PATRONEN**

1. För att avlägsna patronen, vänd ACE dispensern så att logotypen pekar nedåt. **Med skyddshättan avlägsnad**, frigör genom att pressa ejektorknappen i sidled.
2. Dra ut patronen ur ACE dispensern.
3. Släng hatt och patron på lämpligt sätt.
4. Ladda ny patron.

DESINFEKTION: Använd ytdesinficeringsmedel avsett för ABS, PVC och polykarbonat (PC) plaster i enlighet med tillverkarens anvisningar. Undvik direktkontakt mellan desinfektionsmedlet och adhesivmaterialet i patronöppningarna. Dränk inte och autoklavera inte.

GARANTI: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk- och ansvarsskyldighet.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92