

Bisco

CE

REVEAL™ Clear Matrix

Self-Cured

Clear VPS Impression Material

Instructions for Use

DE



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-213R4
Rev. 8/17

REVEAL™* CLEAR MATRIX

Transparentes VPS-Abformmaterial

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

REVEAL Clear Matrix von **BISCO** ist ein transparentes Abformmaterial aus Vinylpolysiloxan (VPS), das feine Details für die Herstellung von provisorischen Restaurationen wiedergibt. Nehmen Sie den vorläufigen Abdruck mit diesem transparenten Material und verwenden Sie die Matrix für die intraorale und extraorale Polymerisation provisorischer Materialien.

Indikationen:

- Verwendung für die intraorale Polymerisation von lichtaktivierten provisorischen Materialien.
- Verwendung als allgemeines Abformmaterial.

Warnhinweise:

- Wenn versehentlich etwas in das Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.

Vorsicht:

- Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgung verwendeter oder kontaminierter Spitzen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Siehe Etiketten der Einzelkomponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- Mit aufgesetzter Mischkanüle lagern, um ein Verhärten des Abformmaterials in den Öffnungen der Kartusche zu verhindern.
- Von Handschuhen stammender Puder kann die Aushärtung beeinträchtigen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.Bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verarbeitungszeit: 1 Minute und 30 Sekunden bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F)

Orale Aushärtezeit: ≤ 2 Minuten und 30 Sekunden

Verarbeitungszeit und Aushärtezeit können je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Kartusche in die Pistole einsetzen, Kartuschenverschluss entfernen, etwa 6 mm ausdrücken und dabei überprüfen, dass das Material gleichmäßig fließt. Das ausgedrückte Material entsorgen und das Ende der Kartusche sauberwischen.
2. Die Mischkanüle anbringen und den Griff der Kartusche vorsichtig und gleichmäßig drücken.
3. Die Mischkanüle nach dem Gebrauch nicht entfernen. Die benutzte Spitze dient bis zum nächsten Gebrauch als praktische Dichtung.
4. Einen starren, transparenten Kunststofflöffel auswählen, der so dimensioniert ist, dass er eine Dicke von 2 bis 3 mm **REVEAL Clear Matrix** aufnehmen kann.
5. Eine dünne Schicht Löffeladhäsiv auf den Löffel auftragen und lufttrocknen lassen.
6. Den Löffel mit **REVEAL Clear Matrix** befüllen. Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 30 Sekunden.
7. Den Löffel einsetzen.
8. **REVEAL Clear Matrix** nach 2 Minuten und 30 Sekunden aus dem Mund entfernen. Den Abdruck mit kaltem Wasser abspülen und trocknen.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F) lagern.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte und Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Nichtverwendung der Produkte entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Verwenders, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte Verwendung zu bestimmen. Der Verwender übernimmt alle damit verbundenen Risiken und die gesamte Haftung.

* REVEAL ist ein eingetragenes Warenzeichen von BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92