

Bisco

C €0459

ORTHO Bracket Paste LC

Light-Cured Bracket Bonding System

Instructions for Use

CN

IN-088R6
Rev. 10/17



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ORTHO BRACKET PASTE LC*

光固化托槽粘结系统

基本信息

ORTHO BRACKET PASTE LC 一种光固化正畸直接粘结系统。该系统将微机械粘结与牙釉质和 ONE-STEP[®] 与 ORTHO BRACKET PASTE LC 之间的化学粘结相结合，形成所有类型的牙列与陶瓷、金属或塑料托槽之间最大的粘结强度。除其突出的粘接性能外，ORTHO BRACKET PASTE LC 允许在粘结剂固化后立即佩戴矫正器，节约医生的椅旁时间，提升客户满意度。

使用范围：

托槽粘结

警告：

- 酸性剂中的磷酸对眼睛和皮肤有严重刺激性。如果酸性剂与皮肤或粘膜接触时间过长，可能造成伤害。如果不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，并马上就医。如与其他组织接触，请立即用大量清水冲洗几分钟。
- 当使用牙科粘接剂时，唾液污染将严重损坏牙本质粘结。
- ONE-STEP 极其易燃。

注意事项：

- 交叉污染：产品可能含有专为一次性使用而设计的组件。请丢弃用过或受污染的单剂量组件和配件。请勿清洗、消毒或重复使用。
- 请勿使用可能含油的磨光粘结剂，因为会留下一层薄膜，从而影响酸蚀质量，降低粘结强度。
- 请勿在牙釉质上摩擦注射器尖头，以避免釉质柱破裂。

预先警告：

- 避免阳光直射酸性剂
- 避免接触皮肤：未聚合的树脂可能导致过敏体质人群皮肤敏化。如发生接触，请用肥皂和水清洗。
- 请查看个别成分标签，了解具体有效日期。
- 应要求提供安全数据表。
- 安全数据表可在Bisco网站www.bisco.com获取。

使用说明

1. 洁牙 - 用橡胶杯中的浮石或鬃毛刷彻底清洁将粘结的牙齿。小心避免刺激牙龈组织，因为轻微出血可能造成污染，并可能影响粘结质量。
注意事项：请勿使用可能含油的磨光粘结剂，因为会留下一层薄膜，从而影响酸蚀质量，降低粘结强度。
2. 用大量清水彻底冲洗。隔离牙齿，并用气枪吹干。
3. 在釉质表面直接涂抹 ETCH-37[®]，涂抹范围仅限于待粘结的区域，等待 30 秒钟（乳牙最多 60 秒钟）。**注意事项：**请勿在牙釉质上摩擦注射器尖头，以避免釉质柱破裂。或者，使用吸收剂颗粒小心在每颗牙齿上轻擦酸性剂，以实现适当的酸渗透。另外，酸蚀的时间切勿超过 90 秒钟，因为时间过长可能导致形成不溶性磷酸钙盐晶体，进而降低粘结强度。
4. 用大量清水彻底清洗每颗牙齿 5 秒钟。用无油空气风干牙齿。酸蚀过的区域应该呈无光泽霜白色。如未呈现此色泽，则需要重新酸蚀该区域。
5. 以 45 度角握住瓶身，并向混合容器滴入 1-2 滴 ONE-STEP。使用刷子，在酸蚀的牙釉质上涂抹薄薄的一层 ONE-STEP。
6. 使用和缓的气流轻轻地彻底风干，以蒸发溶剂。
7. 在托槽背面涂抹 ORTHO BRACKET PASTE LC。将托槽套在封闭的牙齿上，轻轻按压到最终位置。去除多余的材料。小心不要移动托槽底部所有粘结剂的位置。将光探头尽可能接近托槽，光固化托槽 30 秒钟，并按照以下指示操作：
 - a) **金属托槽** - 从切牙面光固化 20 秒钟，并从牙龈面或近中面光固化 10 秒钟
 - b) **陶瓷或塑料托槽** - 从颊面通过矫正线槽光固化 30 秒钟。
8. 粘结剂完全固化后，可立即佩戴主动式矫正器。

托槽摘除：正畸托槽粘剂可以用针状物和剪线钳或其他脱接装置轻松摘除。牙齿表面可以用洁牙机等进一步清洁，并用旋转器械抛光。

卫生学：在使用带有螺旋式锁帽的注射器时，请按照常规的卫生习惯使用，避免在治疗过程中受到污染

废弃物处置：参照社会上关于废弃物处理的条例，如果没有，请参照国家或者是区域的相关废弃物处置的条例。

储存：在室温（20° C/68° F-25° C/77° F）下储存。请查看个别成分标签，了解具体有效日期

保证：如证实产品存在缺陷，BISCO, Inc. 承担更换产品的责任。BISCO, Inc. 概不就因按照或无法按照所述方式使用产品而造成的任何直接或间接损害或损失承担责任。在使用前，用户有责任确认产品对其拟定用途的适用性。用户承担与此相关的所有风险和责任。

* ONE-STEP 是 BISCO, Inc. 的注册商标。

ORTHO BRACKET PASTE LC 由 BISCO, Inc. 生产。

ETCH-37 是 BISCO, Inc. 的商标。

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92