

Bisco

CE 0459

ORTHO Band Paste LC

*Light-
Cured*

Fluoride Releasing Band Bonding System

Instructions for Use

CN



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-133R8
Rev. 11/17

ORTHO BAND PASTE LC

含氟带环粘接系统

基本信息

ORTHO BAND PASTE LC 是一种用于粘固带环的光固化正畸粘接膏。这款亲水系统由树脂基托和含氟药剂组成。**ORTHO BAND PASTE LC** 呈现蓝色调。

应用指征:

正畸带环的粘固

注意事项:

• **交叉污染:** 产品可能包含被设计为一次性使用的物品。应丢弃用过的配件或受污染的配件。切勿清洁、消毒或重复使用。

预防措施:

- 避免与皮肤接触; 未聚合的(甲基)丙烯酸树脂可引起敏感的人皮肤过敏。如发生了接触, 请用肥皂和水清洗皮肤。
- 避免刺激牙龈组织, 因为轻微出血会造成污染, 并可能影响粘接质量。
- 不使用时需将其冷藏 (2°C/36°F - 8°C/46°F)。
- 使用前让冷藏的 **ORTHO BAND PASTE LC** 达到室温。
- 可应要求提供安全数据表。
- 安全数据表可在Bisco网站www.bisco.com获取。

使用说明

注意: 请在使用前让材料达到室温。

1. 去除牙垢石 — 使用橡胶杯或鬃毛刷彻底清洁要与浮石粘接的牙齿。小心避免刺激牙龈组织, 因为轻微出血会造成污染, 并可能影响粘接质量。
2. 用大量清水彻底清洗。隔离牙齿, 并用气枪吹干牙齿表面。
3. 将 **ORTHO BAND PASTE LC** 涂抹在带环的内侧。
4. 将带环固定到牙齿上所需位置。
5. 对咬合面的粘接膏进行光固化, 持续 10 秒。去除多余材料 (应该很容易脱落)。
6. 再次对咬合面进行光固化, 持续 20 秒或直到完全固化。

剥离步骤:

1. 使用带环 / 牙冠清除镊子从颊侧或舌侧除去所粘接的带环 / 牙冠。
2. 使用可除去粘接剂的镊子、刮治器械或旋转工具除去任何残留物。

卫生学: 在使用带有螺旋式锁帽的注射器时, 请按照常规的卫生习惯使用, 避免在治疗过程中受到污染

废弃处置: 请参阅与废弃物相关的社区规定。若无此类规定, 请参阅与废弃物相关的国家或地区规定。

储存: 不使用时将其冷藏 (过夜) (2°C/36°F - 8°C/46°F)。请参阅单个组件标签, 了解具体的过期日期。

保修: BISCO, Inc. 承认其有责任更换被证明存在缺陷的产品。BISCO, Inc. 不对因使用或无法使用上述产品而导致的直接或结果性的任何损害或损失承担责任。用户在使用前有责任确定该产品是否适合其预定用途。用户应承担与此相关的一切风险和责任。

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92