

Bisco

CE 0459

BISFIL 2B *Self-Cured*

Base Increment Composite

Instructions for Use

FI

IN-0041R11
Rev. 11/17



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

BISFIL™* 2B

Alustäyte-yhdistelmämuovi

GENERAL INFORMATION

BISFIL 2B on kemialliskovetteinen, radiopaakki yhdistelmämuovi, joka on tarkoitettu käytettäväksi taka-alueen yhdistelmämuovirestaaraatioiden alustäytteenä suunnatun kutistumisen tekniikassa. Tässä tekniikassa esitetään, että päinvastoin kuin valokoveteisissa yhdistelmämuoveissa **BISFIL 2B** alkaa kovettua dentiniin luonnollisesti lämpimämpien pintojen lähellä. Koska kaikki yhdistelmämuovit kutistuvat polymerisaation aikana, suunnatun kutistumisen tekniikan lopullinen vaikutus on ohjata polymerisaatiota hammasta kohti ja parantaa preparaation adaptaatiota.

BISFIL 2B on matalaviskoosinen ruiskutettava yhdistelmämuovi, joka on saatavana sävyissä A3/A3.5 ja Universal (alkuperäinen). Se on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien hammasmateriaalien kanssa yhteensopivien sidosaineiden kanssa, BISCO:n sidosaineet mukaan lukien, ja päällystettäväksi valokoveteisella yhdistelmämuovilla.

Käyttöaiheet

- Alustäyte luokan I tai II restaaraatioissa

Varoitukset:

- Tämä tuote ei mahdollisesti ole sopiva käyttöön potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt allergisia reaktioita metakrylaattiresiineille.
- Käytettäessä sidosaineita, syljen ja suun nesteiden kontaminaatio heikentää dentiinin sidostumista.

Huomio:

- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet lisävarusteet. Älä puhdista, desinfioi tai käytä uudelleen.

Varoimet:

- Vältä ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiini saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Työstämis- ja kovettumisaikat ovat lyhyempiä lämpimässä suussa
- Polymerisaation tai tukkeutumisen estämiseksi kaksoisruiskun sekoitusjärjestelmä tulisi jättää paikoilleen seuraavaan käyttöön asti. Jos ainetta käytetään suun sisällä, pyyhi sekoitusjärjestelmä desinfiointiaineella ennen säilytystä.
- Lisätietoja on valmistajan ohjeissa. BISCO-sidosaineista poiketen kaikki sidosainejärjestelmät eivät ole kemiallisesti yhteensopivia kemiallis- tai kaksoiskoveteisten materiaalien kanssa.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com

TEKNISET TIEDOT

Huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

Työskentelyaika: Vähintään 2 min.

Kovettumisaika: Enintään 4 min. 30 s.

Työskentely- ja kovettumisaika voi vaihdella riippuen esim. säilytyksestä, lämpötilasta, kosteudesta

KÄYTTÖOHJEET

1. Eristä hammas ja preparaio kaviteetti perinteisesti. Puhdista koko pinta hohkakivihannalla ja vedellä tai hohkakivellä ja CAVITY CLEANSER™ -aineella. Huuhtelee ja kuivaa preparaatio.
2. Applikoi kaikkien hammasmateriaalien kanssa yhteensopiva sidosaine valmistajan ohjeita noudattaen.
3. Jos erillisissä ruiskuja käytetään, annostele kääntämällä ruiskun kahvaa myötöpäivään. Kun toivottu määrä on annosteltu, käännä kahvaa välittömästi vastapäivään, jotta ruiskusta ei työnnä ulos ylimääräistä materiaalia. Sekoita tasaiseksi tahnaksi (10–15 sekuntia). Älä sekoita liikaa, jotta seokseen pääsee mahdollisimman vähän ilmaa. Käytä yhdistelmämuovien sijoittamiseen tarkoitettuja instrumentteja, jotta yhdistelmämuovi ei värjäydy. Jos käytät kaksoisruisku-järjestelmää, noudata mukana toimitettuja KAKSOISRUISKUN KÄYTTÖOHJEITA **BISFIL 2B** -materiaalin jakamisessa ja levittämisessä.
4. Käytä alhaisen viskositeetin kerta-annoskärkeä* ja aseta **BISFIL 2B** vain dentiini-hammaskiilteen yhtymäkohdan tasolle. Sijoita ennen työstämisaajan loppua pieni määrä valokoveteista yhdistelmämuovia preparaatioon. Pakkaa kevyesti ja kiillota **BISFIL 2B** -materiaalia vasten, jotta sisäänjäynyt ilma pääsee pois. Jatka viimeisen **BISFIL 2B** -kerroksen jälkeen valokoveteisen yhdistelmämuovien pakkaamista hyvin täyttäen asteittain kunnes kaviteetti-preparaatio on täytetty. Valokoveta valmistajan ohjeita noudattaen.
5. Tarkasta okklusio ja aloita viimeistelytoimenpiteet. Kun viimeistely- ja kiillotustoimenpiteet on tehty, suosittelemme pintatiivistäineen käyttämistä, esim. FORTIFY™* tai BisCover™* LV, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä parantaa saumatiivyyttä ja vähentää kulumista ja värjäntymistä.

HYGIENIA: Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttö on suositeltavaa, jotta **BISFIL 2B** –ruiskut eivät kontaminoidu hoidon aikana.

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.

TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai seuraussellista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

¹ Bertolotti R. Posterior Composite Technique Utilizing Directed Polymerization and a Novel Matrix. Pract Periodont Aesthetic Dent 1991; 3(4):53-58..

* BISFIL, CAVITY CLEANSER, FORTIFY ja BisCover ovat BISCO, Inc:n tavaramerkkejä.

Alhaisen viskositeetin kerta-annoskärkiä jälleenmyy BISCO, Inc.

▲ Lisätietoja on valmistajan ohjeissa. Kaikki yhden pullon sisältämät eivät sisälly kaksiosiovetettuihin tai kemialliskovettuihin yhdistelmämuoveihin

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92