

*Bisco*

CE

# *NB Instrument Kit*

*Composite Placement Instruments*

## Instructions for Use

FR



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

IN-222R1  
Rev. 12/17

**NB Instrument\* Kit**  
**Instruments pour la mise en place de composites**

Vérifier que les instruments ne soient pas endommagés avant de les utiliser.  
Ne pas les utiliser s'ils sont endommagés.

Nettoyer les instruments dès que possible après usage : les instruments peuvent être nettoyés à la main ou à l'aide d'un nettoyeur à ultrasons ou automatique et d'un détergent neutre, sans savon et non-corrosif. Ne pas utiliser d'abrasifs.

Stériliser avant la première utilisation et entre chaque patient : passer à l'autoclave 20 minutes à 121°C/250°F (15 psi)

\* Les NB Instruments sont fabriqués par BISCO, Inc.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
33-4-90-42-92-92