

Bisco

CE

NB Instrument Kit

Composite Placement Instruments

Instructions for Use

NL



IN-222R1
Rev. 12/17

1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

NB Instrument* Kit

Instrumenten voor het aanbrengen van composiet

Inspecteer het instrument vóór gebruik op eventuele schade. Gebruik het niet als er enige schade is.

Reinig het instrument zo spoedig mogelijk na gebruik: instrumenten kunnen met de hand worden gewassen of in een ultrasone of automatische vaatwasser met een niet-bijtend, niet-schuimend, neutraal vaatwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.

Steriliseer het instrument vóór het eerste gebruik en tussen patiënten in: 20 minuten in de autoclaaf bij 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments worden vervaardigd door BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com



BISICO France
120, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92