

CHARACTERIZATION TINTS

Light-Cured

Instructions for Use



FR

IN-212R4
Rev. 9/17

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

CHARACTERIZATION TINTS* **(COLORANTS DE CARACTERISATION)**

INFORMATION GENERALE

Les **CHARACTERIZATION TINTS (COLORANTS DE CARACTERISATION*)** de BISCO sont des résines liquides microchargées hautement pigmentées utilisées pour des effets de caractérisation comme le maquillage des sillons occlusaux, des traits de fracture liés au stress, des taches laiteuses des incisives et des taches de décalcification. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les **CHARACTERIZATION TINTS (COLORANTS DE CARACTERISATION*)** lorsqu'ils sont placés entre deux couches d'un composite de restauration ou sous la surface de celui-ci. Les **CHARACTERIZATION TINTS (COLORANTS DE CARACTERISATION*)** peuvent également être utilisés pour modifier et caractériser les facettes en céramique. Les **CHARACTERIZATION TINTS (COLORANTS DE CARACTERISATION*)** peuvent être utilisés comme opaques ou modificateurs de teintes, et sont disponibles dans une large gamme de teintes pouvant être mélangées ensemble afin d'obtenir des colorants intensifs personnalisés.

Indications :

Colorants intensifs photopolymérisables

Avertissements :

- En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau et contacter immédiatement les services médicaux. En cas de contact avec d'autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes.

Mises en garde :

- Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.

Précautions :

- Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l'eau et au savon.
- Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
- Pour utilisation avec des ciments et composites photopolymérisables ; ne pas utiliser avec des composites chimopolymérisables.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Préparer la dent et appliquer l'agent de liaison selon les instructions du fabricant.
2. Mélanger (si nécessaire) les colorants et opaques à utiliser.
3. Le matériau peut être directement appliqué sur la couche d'adhésif, placé entre deux couches de composite, ou mélangé avec un ciment photopolymérisable (veiller à ne pas incorporer de bulles d'air), à l'aide d'un pinceau ou d'un instrument.
4. Photopolymériser au minimum 20 secondes.

5. Terminer la restauration avec un composite de manière habituelle. Si le colorant est placé à la surface d'une restauration en composite, son abrasion naturelle éliminera rapidement la teinte désirée.

HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C / 68°F - 25°C / 77°F).

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

* LES CHARACTERIZATION TINTS (COLORANTS DE CARACTERISATION*) sont fabriqués par BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92