

***CHARACTERIZATION TINTS***

*Light-Cured*

Instructions for Use



NL

IN-212R4  
Rev. 9/17

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# **CHARACTERIZATION TINTS\*** **(KARAKTERISERINGSTINTEN)**

## **ALGEMENE INFORMATIE**

BISCO's **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSTINTEN)** zijn sterk gepigmenteerde, opverfbare microvulvloeistoffen, gebruikt voor karakteriseringseffecten zoals occlusale kleuring, stressfracturen, melkachtige snijtanden en ontkalkingsplekken. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSTINTEN)** leveren het beste resultaat op wanneer ze binnen de lagen van, dan wel onder, de composietrestauratie worden geplaatst. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSTINTEN)** kunnen ook worden gebruikt voor het aanpassen en karakteriseren van porseleinfineerrestauraties. **CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSTINTEN)** kunnen worden gebruikt als opacificatie- of modificatiemiddel, en zijn verkrijgbaar in een uitgebreid spectrum van tinten die kunnen worden gemengd om zelfgemaakte intensificatiemiddelen te verkrijgen.

### **Gebruiksindicatie:**

Met licht uitgehard kleurintensificatiemiddel

### **Waarschuwingen:**

- Indien het per ongeluk in het oog spat, spoelt u het oog met ruime hoeveelheid water en roept u onmiddellijk medische hulp in. Bij contact met andere weefsels onmiddellijk enkele minuten lang spoelen met veel water.

### **Waarschuwingen:**

- Kruisbesmetting: Dit product kan artikelen bevatten die ontworpen zijn voor éénmalig gebruik. Gebruikte of besmette tips afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of hergebruiken.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

- Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
- Zie de etiketten van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdata.
- Voor gebruik bij met licht uitgeharde composieten en cementen; niet gebruiken met zelfhardende composieten.
- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

1. Prepareer de tand en breng hechtmiddel aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
2. Meng (zo nodig) de te gebruiken tinten en opacificatiemiddelen.
3. Het materiaal kan rechtstreeks over het adhesief heen worden aangebracht, in lagen binnen de composiet, of met een lichtgeharde cement worden gemengd (waarbij wordt opgelet dat geen lucht wordt ingemengd), met een penseel of instrument.
4. Laat minimaal 20 seconden met licht uitharden.
5. Voltooi de restauratie met composiet zoals u dat gewoonlijk doet. Bij aanbrenging op het oppervlak van een composietrestauratie zal de gewenste kleur snel verdwijnen door natuurlijke afschuring.

**HYGIËNE:** Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.

**AFVOER:** Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

**OPSLAG:** Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIE:** BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker neemt alle risico en aansprakelijkheid in verband daarmee op zich.

\* CHARACTERIZATION TINTS (KARAKTERISERINGSTINTEN) worden vervaardigd door BISCO, Inc.

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
33-4-90-42-92-92